


# INSTRUCCIONES DEL KIT BUCAL TRIO

Vea el video de recolección de muestra bucal en [www.genedx.com/buccal](http://www.genedx.com/buccal)

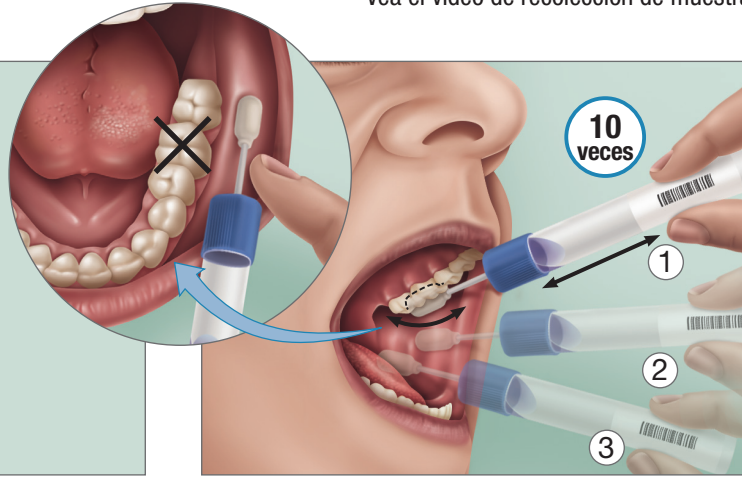

**1** No coma ni beba nada al menos 30 minutos antes de recolectar las muestras; esto incluye goma de mascar, tabaco de mascar, fumar cigarrillos, mentas, pastillas u otros caramelos duros. Este kit tiene 4 tubos de recolección de hisopados bucales, úselos según las indicaciones:



**Paciente:** dos tubos de recolección de hisopados bucales nuevos  
**Familiar A:** un tubo de recolección de hisopado bucal nuevo  
**Familiar B:** un tubo de recolección de hisopado bucal nuevo

**2** Retire el colector sin tocar la punta de la esponja. Coloque la esponja (dentro de la mejilla) en el espacio donde las encías superiores se unen con la mejilla. Raspe esta zona con un movimiento hacia atrás y hacia adelante al menos 10 veces. Repita el movimiento de raspado en el medio y en la parte inferior de la mejilla.


**No frote los dientes.**

**3** Sostenga el tubo en posición vertical para evitar que se derrame el líquido estabilizante del interior del tubo. Invierta la tapa hacia abajo, inserte la esponja en el tubo y cierre la tapa con firmeza. Invierta el tubo tapado y agite energicamente 10 veces.

**4** Repita los pasos 1 a 3 para el Familiar A usando un tubo de recolección de hisopado bucal nuevo para obtener una muestra de **ambas** mejillas. Repita los pasos 1 a 3 para el Familiar B usando un tubo de recolección de hisopado bucal nuevo para obtener una muestra de **ambas** mejillas.

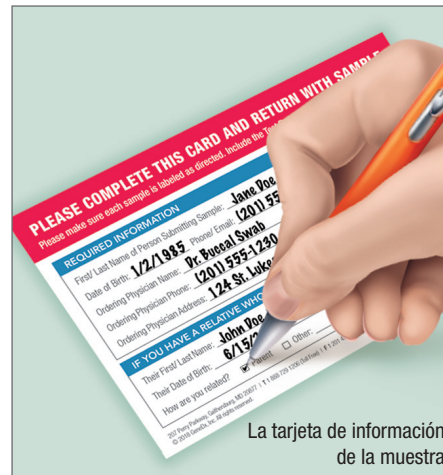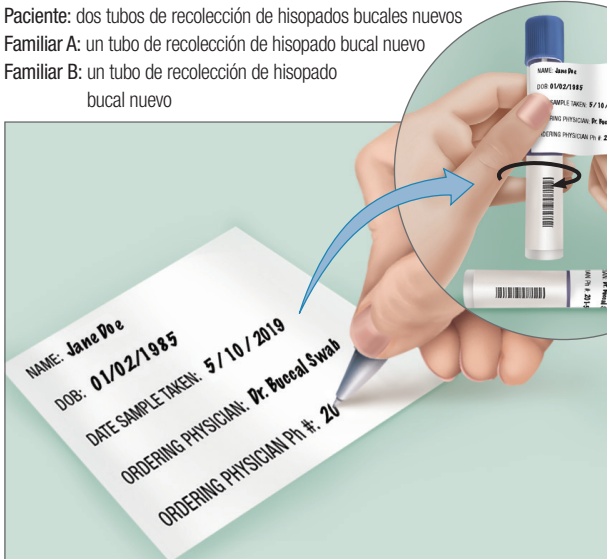

La tarjeta de información de la muestra

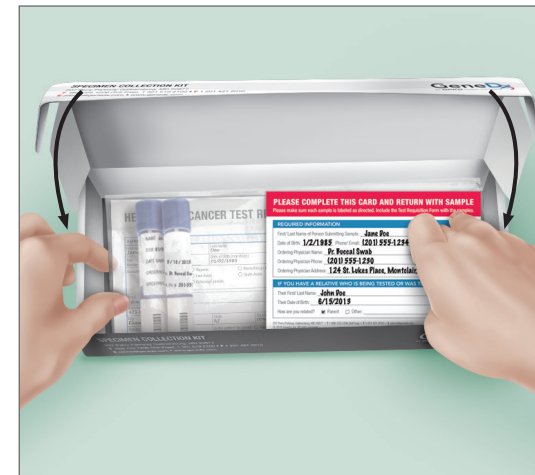

**¡ESPERE!**

Antes de enviar su kit completo, asegúrese de incluir:

- Las muestras etiquetadas (2 del paciente, 1 del Familiar A, 1 del Familiar B)
- El formulario de solicitud de prueba completado **O BIEN**
- La tarjeta de información de la muestra completada

**5** Complete la etiqueta que se le proporciona con su nombre y fecha de nacimiento, y **coloque la etiqueta sobre el costado del tubo de recolección**. Repita los pasos 1 a 3 para el paciente usando el segundo hisopo, y repita el movimiento de frotación en la mejilla derecha 10 veces más. **Todos los tubos deben estar etiquetados.**

**6** Toda muestra **DEBE** estar acompañada de un formulario de solicitud de prueba completado (preferentemente) o al menos una tarjeta de información de la muestra completada. **\*\*Los resultados de las muestras presentadas sin el formulario de solicitud ni la tarjeta de información de la muestra tendrán demoras.\*\***

**7** **Para enviar las muestras**, coloque todos los tubos etiquetados en la bolsa con el símbolo de riesgo biológico y sellela. Introduzca el formulario de solicitud de prueba **completado** y/o la tarjeta de información de la muestra en el segundo bolsillo de la bolsa para materiales de riesgo biológico. Coloque la caja dentro del FedEx Clinical Pak y selle el FedEx Pak. Adhiera la etiqueta de FedEx al paquete. Llame a FedEx para que recoja el paquete o déjelo en una sucursal de FedEx de su zona.